

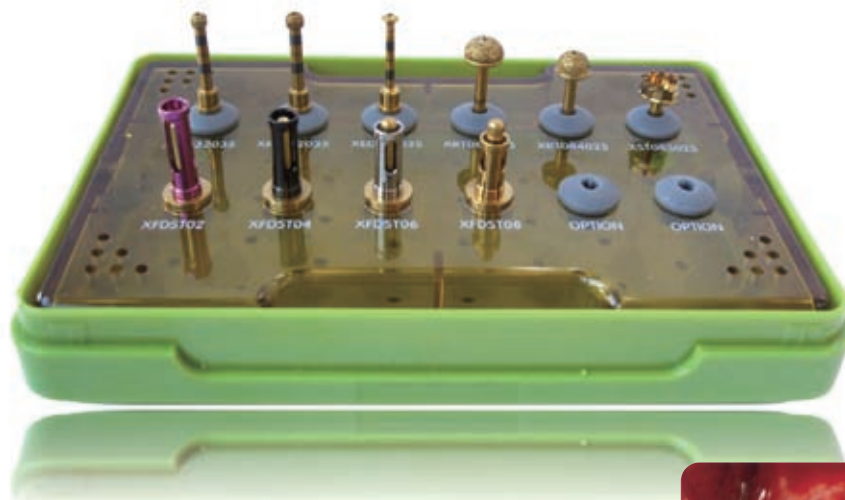
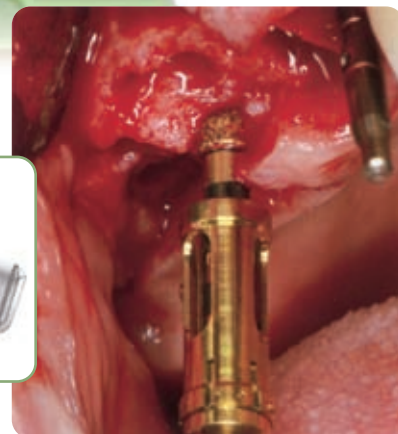
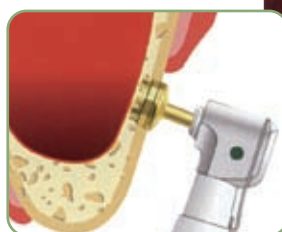


# STANUS DRILL KIT

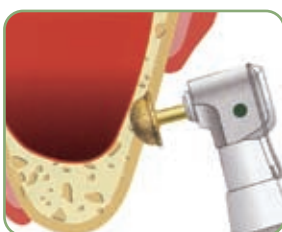


## サイナスドリル キット

品番 **deDASK01** ¥140,000

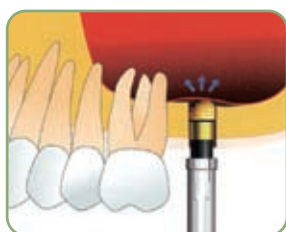

## サイナス ドリル

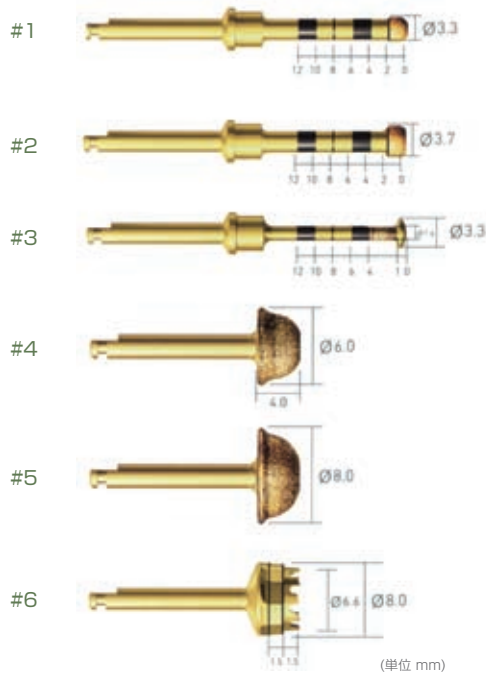

#1 (ソケット用ドリル)	品番 <b>deDASK02</b>	¥20,000
#2 (ソケット用ドリル)	品番 <b>deDASK03</b>	¥20,000
#3 (ソケット用ドリル)	品番 <b>deDASK04</b>	¥20,000
#4 (ラテラル用ドリル)	品番 <b>deDASK05</b>	¥20,000
#5 (ラテラル用ドリル)	品番 <b>deDASK06</b>	¥20,000
#6 (ラテラル用トレフィル)	品番 <b>deDASK07</b>	¥20,000



## サイナスドリル用ストッパー



08 (8mm用)	品番 <b>deXFDST8</b>	¥4,000
06 (6mm用)	品番 <b>deXFDST6</b>	¥4,000
04 (4mm用)	品番 <b>deXFDST4</b>	¥4,000
02 (2mm用)	品番 <b>deXFDST2</b>	¥4,000

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000561

※ 全て税抜き価格です

### サイナスドリル #1～#3



① サイナスドリル#1、#2を使用して、残りの骨（1mm）を僅かな陥没が感じられるまで穿孔して下さい。




② ドーム型のキュレットを使用してシュナイダー膜を持ち上げます。





③ サイナスドリル#3を使用してシュナイダー膜を剥離します。

### サイナスドリル #3

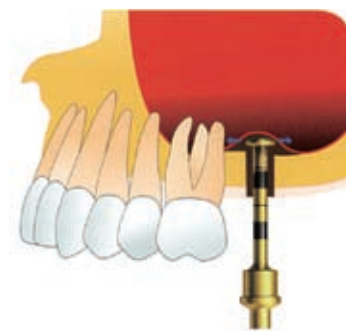



オステオームで上顎洞底骨を脱臼した後、サイナスドリル#3にてシュナイダー膜を丁寧に持ち上げます。

### サイナスドリル #4,#5

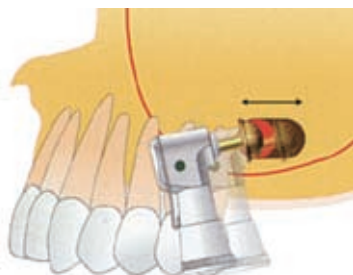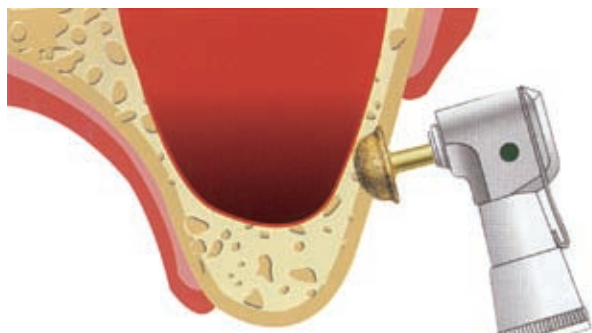

サイナスドリル#4、#5でシュナイダー膜に到達するよう、45°の角度で上顎洞側壁を形成していき骨窓を薄くしていきます。

### サイナスドリル #6

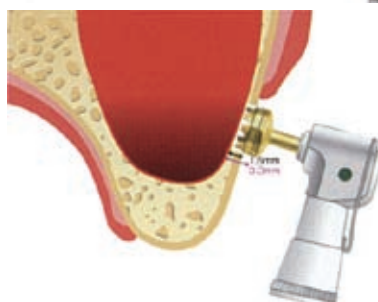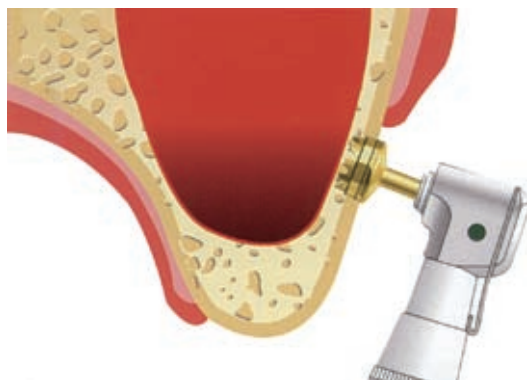

サイナスドリル#6はトレフィンバーのように上顎洞側壁から骨窓の骨を切離すためのドリルです。